

ACCU-CHEK®

Safe-T-Pro Plus

0 3603539150

.../STERILNÍ LANCETOVÉ PERO NA JEDNO POUŽITÍ

CZ Sterilní lancetové pero na jedno použití pro odběr kapilární krve z konečku prstu nebo z patičky u dětí do 1 roku.

Součásti lancetového pera na jedno použití

(viz obrázek 1)

1 Popis

- ① Uvolňovací knoflík
- ② Plášť
- ③ Regulátor hloubky vpichu
- ④ Sterilní kryt
- ⑤ Ukazatel hloubky vpichu
- ⑥ Malá hloubka vpichu (cca 1.3 mm)
- ⑦ Střední hloubka vpichu (cca 1.8 mm, přednastavená)
- ⑧ Velká hloubka vpichu (cca 2.3 mm)

Příprava na odběr krve

2 Děti mladší 1 roku

U dětí mladších jednoho roku se krev musí odebírat z patičky. Odběr je nutno provést z postranních částí chodidla (viz černé plochy na obrázku 2).

Vpich musí být veden kolmo k ploše chodidla (viz šipky na zvětšené části obrázku). Během odběru je třeba držet dítě tak, aby jeho noha směřovala svisle k podlaze. Vpich se nesmí provádět dvakrát do stejného místa.

Před odběrem můžete zlepšit prokrvení patičky tím, že ji opatrně zahřejete, například zabalením do teplé vlhké tkaniny o teplotě nejvýše 42 °C.

Patičku je nutné vydezinfikovat a poté zcela osušit.



K odběru kapilární krve z patičky u dětí do 1 roku **používejte jen malou nebo střední hloubku vpichu**. Při použití velké hloubky vpichu hrozí poranění kalkanea (patní kosti).

3 Děti starší 1 roku a dospělí

Doporučujeme odebírat krev z postranních částí konečků prstů, protože tato místa jsou nejméně bolestivá (viz černé plošky na obrázku 3). K odběru lze použít kterýkoli prst.

Pacient by měl mít ruce umyté teplou vodou a mýdlem a poté důkladně osušené. Bude tak zajištěna čistota místa vpichu a podpořeno prokrvení. Při použití tampónů navlhčených alkoholem musí být prst také zcela suchý.

Odběr krve

4 Odstranění sterilního krytu

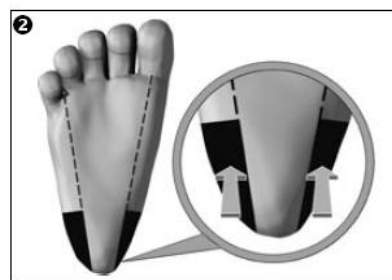
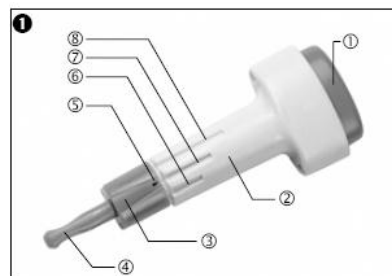
► Otočte sterilním krytem a sejměte jej.





Jednorázové lancetové pero nepoužívejte, pokud již dříve došlo k sejmutí sterilního krytu.

5 Nastavení hloubky vpichu

► Otočte regulátor hloubky vpichu na požadovanou hloubku.





 Nastavení hloubky vpichu neprovádějte před sejmutím sterilního krytu.

 K odběru kapilární krve z patičky u dětí do 1 roku **používejte jen malou nebo střední hloubku vpichu.** Při použití velké hloubky vpichu hrozí poranění kalkanea (patní kosti).

⊕ Získání krve

- ▶ Lancetové pero držte mezi ukazováčkem, prostředníčkem a palcem.
- ▶ Přitiskněte lancetové pero pevně na zvolené místo vpichu.
- ▶ Palcem stiskněte na doraz uvolňovací knoflík.
- ▶ Jemným masírováním prstu směrem ke konečku nebo mírným tlakem na patičku napomáhejte vytvoření kapky krve.

 Při některých diagnostických testech nesmíte prst/patičku intenzivně masírovat nebo tisknout, neboť to může vést k nepřesným výsledkům.

 Lancetové pero na jedno použití vždy vyhodte podle pokynů k likvidaci platných na vašem pracovišti.

Poslední aktualizace

2009-03

Středisko služeb zákazníkům a servis








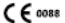
Roche s.r.o.
Diagnostics Division
Karlovo náměstí 17
120 00 Praha 2
Česká Republika

Patenty

US 5 755 733 licencováno Asahi, US 7 238 192

Vysvětlení použitých symbolů jsou uvedena na konci tohoto návodu.

Vysvětlení symbolů

	/ Čtěte návod k použití
	/ Pouze k jednomu použití
	/ Použijte do/Datum expirace
	/ Sterilizováno zářením
	/ Výrobce
	/ Katalogové číslo
	/ Číslo šarže
	/ Tento výrobek splňuje požadavky směrnice 93/42/EHS o zdravotnických prostředcích.

Distribuce:

Roche s.r.o., Divize diagnostiky
Karlovo nám. 17
102 00 Praha 2
Česká republika

© 2010, Roche Diagnostics



ACCU-CHEK a SAFE-T-PRO jsou ochranné známky Roche.



Roche Diagnostics GmbH,
Sandhofer Strasse 116
D-68305 Mannheim, Německo
www.accu-chek.com

